

キットの説明



注意事項

- 採取前**1時間以内**に水以外の飲食、喫煙、歯磨き、マウスウォッシュなどは、絶対に行わないでください。
- 採取いただいた検体は、**常温**にて保管ください。
- 唾液を少しずつ採取すると、唾液が泡立って、正確な量の採取がしづらくなるため、**唾液を一定時間（5分推奨）口の中に含んでから、容器の黒い線を超える量を採取してください。**
不足の場合、さらに5分程度、含んでから採取してください。
- 検体番号が印字されたQRコードラベルは、**チューブに直接**貼り付けてください。
- HELPOサービスをご利用の場合は、必ずQRコードラベルを貼り付ける**前**に、QRコードをHELPOアプリで読みとってください。


- ① チューブの下についているキャップを取り外します。



- ② 黒い線を十分に超えるまで唾液を入れます。



- ③ チューブの底を軽く叩いて唾液をそこに落とします。

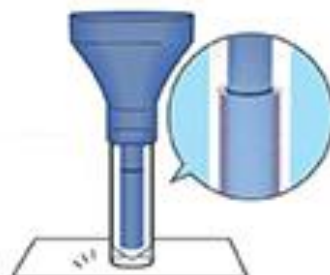

- ④ ろうと部分を回して取り外し保存液をチューブ内に入れます。



- ⑤ キャップを回して固く閉めます。



- ⑥ チューブを30回以上転倒し混和します。



- ⑦ QRコードのラベルをチューブに貼り付けます。



※本マニュアルは、唾液採取キットと同梱されませんので、必ず検体採取される皆様にご展開ください。